

南宁中心血站（南宁输血医学研究所）

血型参比实验室

样本送检采样要求（用户手册）

检验项目	样本类别	样本数量及容量	采样时间
输血前疑难交叉配血	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 不抗凝全血样管 1~2 支，样本量 5ml~10ml； EDTA 抗凝全血样管 1~2 支，样本量 5ml。	送检前 3 天内 (最好 1 天内)
母婴血型不合引起的新生儿溶血病检测 (HDN)	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 新生儿：EDTA 抗凝全血样管 1 支，样本量 3ml~5ml； 母亲：不抗凝全血样管 1 支，样本量 5ml； EDTA 抗凝全血样管 1 支，样本量 2ml~5ml。	送检前 3 天内
疑难血型鉴定	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 不抗凝全血样管 1 支，样本量 5ml； EDTA 抗凝全血样管 1~2 支，样本量 5ml。	送检前 3 天内
抗体筛查及鉴定	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 不抗凝全血样管 1 支，样本量 5ml； EDTA 抗凝全血样管 1~2 支，样本量 5ml。	送检前 3 天内
Rh(D) 阴性确认	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 不抗凝全血样管 1 支，样本量 5ml； EDTA 抗凝全血样管 1 支，样本量 2ml~5ml。	送检前 3 天内
抗球蛋白 (coombs) 试验	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 不抗凝全血样管 1 支，样本量 5ml； EDTA 抗凝全血样管 1 支，样本量 2ml~5ml。	送检前 3 天内